



Syai PDM

Upute za upotrebu


Model proizvoda: R1

Syai Health Technology Pte., Ltd

1. SADRŽAJ



a. PDM

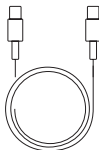

b. USB kabel
za punjenje




c. Upute za upotrebu

2. PREGLED

2.1 Kratki uvod u proizvod

Uređaj za upravljanje osobnim podacima (u daljnjem tekstu: PDM) prijenosni je uređaj dizajniran da korisnicima omogući uvid u dnevne podatke. Koristi se u kombinaciji s namjenskim aplikacijama Syai za jednostavnije upravljanje osobnim podacima.

2.2 Izgled PDM-a

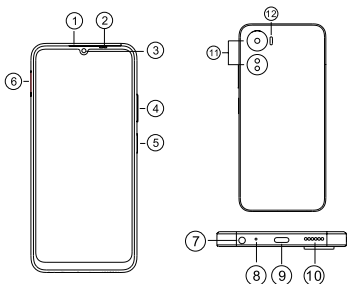

1. prijamnik
2. infracrveni senzor
3. prednja kamera
4. gumb za glasnoću
5. gumb za uključivanje/isključivanje/gumb za prepoznavanje otisaka prstiju
6. utor i držač za TF/SIM karticu
7. priključak za slušalice
8. mikrofonski otvor
9. USB ulaz za punjenje
10. otvor za zvučnik
11. stražnje kamere
12. svjetiljka


2.3 Instalacija i priprema

Koraci umetanja kartica

Napomena: Ako umetanje SIM kartice nije potrebno, preskočite ovaj korak.

PDM-ova pločica za karticu može prihvatiti 1 mikro-SD karticu i 2 SIM kartice.

- Umetnite iglu PDM uređaja u otvor za iglu i pritisnite prema unutra. Držač za karticu će iskočiti.
- Izvadite držač za karticu.
- Umetnite SIM karticu u držač za karticu tako da je metalna strana okrenuta dolje, a kosi rub poravnat s kosim rubom utora.
- Držeći PDM s prednjom stranom okrenutom prema gore, pritisnite držač za karticu u kojem se nalazi mikro-SD i SIM kartica/e u držač kartice uređaja PDM u skladu sa smjerom koji pokazuje strelica ispod

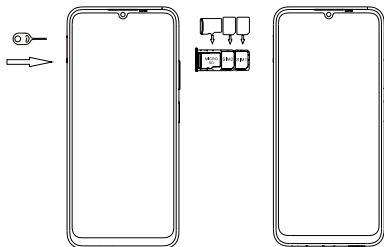

Punjenje PDM uređaja

Priključite jedan kraj USB kabela za punjenje u USB ulaz za punjenje PDM uređaja, a drugi kraj kabela umetnite u strujni adapter ili kompatibilni uređaj da biste započeli punjenje. Kad je punjenje završeno, odvojite PDM od adaptera ili kompatibilnog uređaja i izvadite adapter iz utičnice.

Upozorenje:

Koristite USB kabel za punjenje i strujni adapter koji su kompatibilni s uređajem za punjenje PDM uređaja.

2.4 Zaključavanje i otključavanje zaslona

PDM će automatski zaključati zaslon nakon razdoblja neaktivnosti. Možete namjestiti interval automatskog zaključavanja zaslona ili možete izravno pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje da biste ručno zaključali zaslon. PDM možete također uključiti pritiskom na gumb za uklj./isklj.

2.5 Parametri indeksa učinkovitosti

Indeks učinkovitosti	Parametri
Naziv proizvoda	Uređaj za upravljanje osobnim podacima (PDM)
Prednja kamera	8MP
Glavna stražnja kamera	13MP
Druga stražnja kamera	0.08MP
Treća stražnja kamera	0.08MP
Držač za memorijsku	Da
Dimenzije	164.5*76*8.95mm

4G	B1/2/3/5/7/8 /20/28AB/38/40/41
3G	B1/2/5/8
2G	B2/3/5/8
Ekran	6.745" HD+(720*1600)

3. Početne postavke PDM uređaja

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste uključili PDM i držite oko 3 sekunde, nakon čega će se zaslona uređaja uključiti i prikazati animaciju kod pokretanja.

Odabir regije i jezika

Nakon što završi animacija kod pokretanja, prikazuje se sučelje za odabir regije i jezika. Možete odabrati regiju i jezik dodirom odgovarajuće mogućnosti.

Postavke

Nakon odabira regije i jezika prikazuje se stranica postavki (Settings). Prva opcija postavljanja odnosi se na internet. Tri su mogućnosti:

- Wi-Fi i mobilni podatci
- Wi-Fi
- Mobilni podaci

Možete dodirnuti jednu od željenih postavki povezivanja s internetom. Međutim, ako niste umetnuli SIM karticu/e u PDM, pojavit će se obavijest „Mobilni podaci nisu dostupni“, pa možete odabrati opciju Wi-Fi.

Nakon odabira opcije povezivanja s internetom (ovdje navodimo primjer Wi-Fi povezivanja), dodirnite tipku Next za prelazak na sljedeću stranicu.

Dodirnite tipku Wi-Fi i odaberite Wi-Fi koji koristite, zatim unesite lozinku za spajanje na Wi-Fi. Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, pojavit će se obavijest koja prikazuje Wi-Fi na koji ste povezani.

Dodirnite tipku Next za prelazak na sljedeću stranicu.

Odaberite APP

Nakon postavljanja interneta prikazuje se sučelje za odabir aplikacije (App). Možete birati između tri aplikacije ovisno o vašoj ulozi i načinu upotrebe.

Aplikacije između kojih možete birati su:

- Syai Tag
- Syai Doctor
- Syai Essential

Napomena: Syai Essential je pojednostavljena verzija Syai Tag s manje funkcija. Uvjerite se da trenutno koristite uređaj Syai Essential prije odabira aplikacije koju ćete koristiti.

Dodirnite i odaberite odgovarajuću aplikaciju koja odgovara vašoj ulozi i načinu upotrebe. Dodirnite gumb Start Now. Time su završene početne postavke.

Pokretanje uređaja

Nakon odabira Start Now, pojavljuje se stranica napretka na kojoj se pokazuje postotak izvršenog pokretanja. Pričekajte dok pokretanje završi. Postupak može trajati nekoliko minuta.


4.Upotreba PDM-a

Budući da možete birati između 3 aplikacije, u ovom se dijelu opisuje upotreba PDM-a u svakom od ta tri scenarija.

Scenarij 1: Odabran je Syai Tag.

Prijava, aktivacija i praćenje

01. Prijavite se ako već imate račun ili se registrirajte ako ga nemate.
02. Dodirnite tipku za primjenu novog monitora (Apply New Monitor).
03. Aktivirajte monitor, dodirnite tipku Scan QR Code, zatim upotrijebite kameru telefona da biste skenirali QR kod na Aplikatoru za provjeru proizvoda.
04. Slijedite upute dok se ne prikaže da se povezuje Bluetooth (Bluetooth is connecting).
05. Nakon aktivacije monitora i povezivanja Bluetootha, stranica za zagrijavanje prikazuje 30-minutno odbrojanje.
06. Nakon završetka odbrojanja za zagrijavanje, prikazuje se stranica za praćenje.

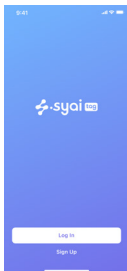


01




02



03

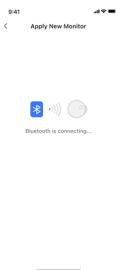

04

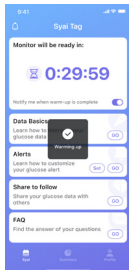

05



06


Sažetak, profil i vraćanje na tvorničke postavke

01. Možete pogledati stranicu sažetaka (Summary) radi uvida u pojedinosti i pregleda svog statusa praćenja.

02. Na stranici profila (Profile) možete dodirnuti ikonu avatara da biste vidjeli osobne podatke, a ikonu postavki (Settings) za provjeru postavki.







01

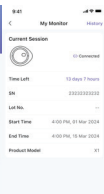


02

03. Ako želite uređaj vratiti na tvorničke postavke, dodirnite ikonu postavki (Settings), zatim ikonu sustava (System) i na kraju Restore Factory Settings.

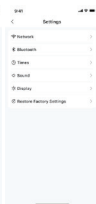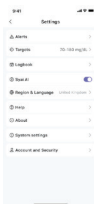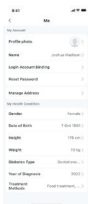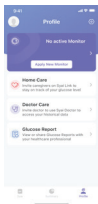

04. Nakon dodira na Restore Factory Settings, pojavit će se poruka upozorenja da će se svi podatci trajno izbrisati. Dodirnite tipku za brisanje svih podataka (Delete All Data) da biste nastavili s resetiranjem.

- Javlja se obavijest upozorenja - dodirnite tipku Next.
- Ponovno se javlja obavijest upozorenja - pričekajte
- 3 sekunde pa dodirnite OK.
- Dodirnite tipku OK da biste dovršili resetiranje. Nakon što je resetiranje (vraćanje na tvorničke postavke) gotovo, prikazuje se animacija kod pokretanja.

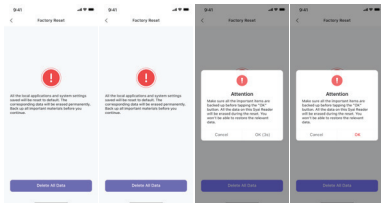

Scenarij 2: Odabran je Syai Essential

Stranica za prijavu, aktivaciju i praćenje

01. Prijavite se ako već imate račun ili se registrirajte ako ga nemate.

02. Dodirnite tipku Apply New Monitor.

03. Aktivirajte monitor, dodirnite tipku Scan QR Code, zatim upotrijebite kameru telefona da biste skenirali QR kod na Aplikatoru za provjeru proizvoda.

04. Slijedite upute dok se ne prikaže da se povezuje Bluetooth (Bluetooth is connecting).

05. Nakon aktivacije monitora i povezivanja Bluetootha, stranica za zagrijavanje prikazuje 30-minutno odbrojavanje.

06. Nakon završetka odbrojavanja za zagrijavanje, prikazuje se stranica za praćenje.

07. Možete dodirnuti tipku On-demand za prikaz najnovijih podataka.



01



02



03



04



05



06




07

Sažetak, profil i vraćanje na tvorničke postavke

- Možete pogledati stranicu sažetaka (Summary) radi uvida u pojedinosti i pregleda svog statusa praćenja.
- Na stranici profila (Profiles) možete dodirnuti ikonu avatara za prikaz osobnih podataka i ikonu postavki za prikaz postavki.






01

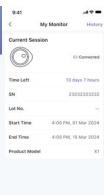


02

- Ako želite uređaj vratiti na tvorničke postavke, dodirnite ikonu postavki (Settings), zatim ikonu sustava (System) i na kraju Restore Factory Settings.

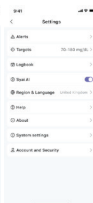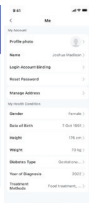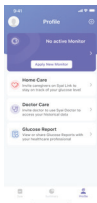

- Nakon dodira na Restore Factory Settings, pojavit će se poruka upozorenja da će se svi podatci trajno izbrisati. Dodirnite tipku za brisanje svih podataka (Delete All Data) da biste nastavili s resetiranjem.
- Javlja se obavijest upozorenja - dodirnite tipku Next.
- Ponovno se javlja obavijest upozorenja - pričekajte 3 sekunde pa dodirnite OK.
- Dodirnite tipku OK da biste dovršili resetiranje. Nakon što je resetiranje (vraćanje na tvorničke postavke) gotovo, prikazuje se animacija kod pokretanja.

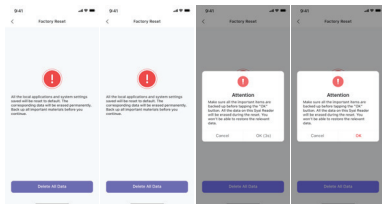

Scenarij 3: Odabran je Syai Doctor

Prijava, dodavanje pacijenta i aktivacija

01. Prijavite se ako već imate račun ili se registrirajte ako ga nemate.
02. Nakon prijave, dodirnite tipku za dodavanje pacijenta (Add Patient). Može također uključiti način rada Gateway Mode.
03. Pacijenta možete dodati po adresi e-pošte


ili telefonu. Ovdje je naveden primjer putem e-pošte: unesite pacijentovu adresu e-pošte i dodijelite mu serijski broj u stupcu Practice. Polje Remark (primjedbe) je opcionalno.


04. Nakon dovršetka dodavanja pacijenta ili pacijenata, počnite aktivirati praćenje. Dodirnite tipku Scan QR Code, upotrijebite kameru telefona za skeniranje QR koda na Aplikatoru za provjeru proizvoda.

05. Slijedite upute dok se ne prikaže da se povezuje Bluetooth (Bluetooth is connecting).

06. Bluetooth je sad povezan. Možete nastaviti dodavati pacijente dodirom tipke za dodavanje novog pacijenta (Add a New Patient). Pacijenti koje ste dodali prikazuju se na popisu.

07. Dodirnite jednog pacijenta na popisu da biste vidjeli njegov status.

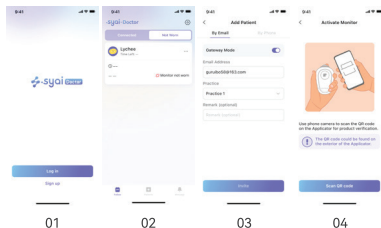

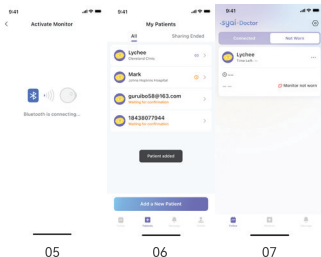


Stranica za praćenje i profil

01. Pacijentove podatke o glukozi možete vidjeti na stranici za praćenje.

02. Ako je trenutni monitor istekao, možete primijeniti novi monitor dodirom na tipku Apply New Monitor.

03. Osobne podatke možete vidjeti na stranici profila (Profile).

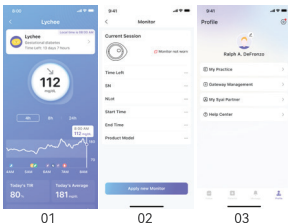



Vraćanje na tvorničke postavke

01. Ako želite uređaj vratiti na tvorničke postavke, dodirnite ikonu postavki (Settings), zatim ikonu sustava (System) i na kraju Restore Factory Settings.

02. Nakon dodira na Restore Factory Settings, pojavit će se poruka upozorenja da će se svi podatci trajno izbrisati. Dodirnite tipku za brisanje svih podataka (Delete All Data) da biste nastavili s resetiranjem.

- Javlja se obavijest upozorenja - dodirnite tipku Next.
- Javlja se još jedna obavijest upozorenja - pričekajte 3 sekunde pa dodirnite OK.
- Dodirnite tipku OK da biste dovršili resetiranje. Nakon što je resetiranje (vraćanje na tvorničke postavke) gotovo, prikazuje se animacija kod pokretanja.

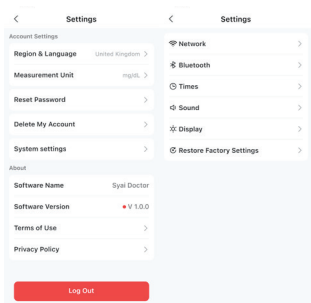

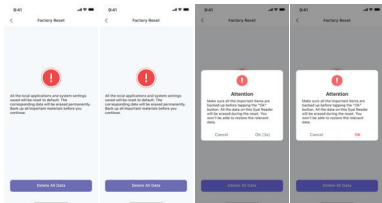

5. POSTAVKE SUSTAVA

Korisnici mogu dodirnuti ikonu postavki da bi personalizirali postavke sustava uređaja PDM. 6 je postavki sustava.

5.1 Mreža

Dodirnite ikonu mreže (Network) da biste vidjeli svoju mrežu i internet. Opcije uključuju internet, pozive i SMS-ove, SIM kartice, način rada u zrakoplovu, javnu pristupnu točku i tethering, spremanje podataka, VPN, mobilni plan i privatni DNS.

5.2 Bluetooth

U ovim postavkama korisnici mogu vidjeti povezane uređaje, upariti nove uređaje i provjeriti spremljene postavke

5.3 Postavljanje vremena

U ovim postavkama nalaze se opcije datuma i vremena. Korisnici mogu automatski postaviti datum, vrijeme i vremenske zone dodirom na odgovarajuću tipku.

5.4 Zvuk

U ovim postavkama korisnici mogu podesiti zvuk i vibraciju, kao što su glasnoća medija, glasnoća poziva, glasnoća zvona i obavijesti i glasnoća alarma.

5.5 Zaslona

Unosom promjena u ovim postavkama korisnici mogu podesiti svjetlinu, izgled, boju i ostale mogućnosti zaslona te ga zaključati.

5.6 Vraćanje na tvorničke postavke

Korisnici mogu resetirati PDM uređaj putem ove opcije.

6. MJERE OPREZA

- a. Koristite USB kabel za punjenje i strujni adapter isporučene u paketu kako biste izbjegli štetu na uređaju.
- b. Pazite da PDM uređaj ne dođe u dodir s vodom, vatrom i drugim opasnim djelovanjima.
- c. Pazite da se PDM uređaj ne ispusti, udara ili trese. Grubo rukovanje PDM uređajem može prouzročiti lom zaslona, oštećenje unutarnjih tiskanih pločica i osjetljivih struktura.

7. PUNJENJE

U PDM uređaj ugrađena je neuklonjiva polimerna Li-ion baterija od 5000 mAh. Za punjenje su isporučeni USB 2.0 kabel za punjenje i strujni adapter od 10 W.

8. SIGURNOST BATERIJE

- Ne povezujte polove baterije s vodičima kao što su ključevi, nakit ili drugi metalni materijali. To može dovesti do kratkog spoja baterije i posljedično ozljeda ili opekline.
- Bateriju čuvajte od previsokih temperatura i izravne sunčeve svjetlosti. Ne stavljajte je na ili u uređaje koji griju kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Ne pokušavajte izmijeniti ili preraditi bateriju, u nju umetati strane predmete ili je uroniti ili izložiti vodi ili drugim tekućinama. To može prouzročiti požar, eksploziju ili druge opasnosti.
- Ako baterija curi, pazite da elektrolit ne dođe u izravan dodir s kožom ili očima.
- Ako elektrolit dodirne kožu ili prsne u oči, odmah ga isperite čistom vodom i obratite se liječniku.
- U slučaju deformacije baterije, promjene njene boje ili pregrijavanja tijekom punjenja ili pohrane, ili ako se vrijeme u stanju mirovanja značajno smanji, moguće je da je baterija oštećena. Nastavak upotrebe može dovesti do curenja, požara ili eksplozije baterije.
- Ne stavljajte baterije u vatru jer mogu eksplodirati. Oštećene baterije također mogu eksplodirati.

- Odložite iskorištene baterije prema lokalnim propisima. Nepropisna upotreba baterija može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti.
- Ne dozvolite da djeca ili ljubimci grizu ili sišu bateriju. To može dovesti do štete ili eksplozije.
- Nemojte lupati baterijom, probijati je ili izlagati velikom vanjskom pritisku. To može dovesti do kratkog spoja ili pregrijavanja.
- Zamjena baterije neodgovarajućim modelom može dovesti do eksplozije.
- Uređaj sadrži ugrađenu bateriju. Ne pokušavajte je zamijeniti sami. U suprotnom uređaj možda neće dobro raditi ili može doći do oštećenja baterije.
- Bateriju koristite samo uz propisani sustav punjenja. Baterija se smije zamijeniti samo odgovarajućom baterijom. Upotreba neodgovarajuće baterije ili punjača može dovesti do požara, eksplozije, curenja ili drugih opasnosti.
- Nemojte rastavljati ili otvarati, gnječiti, savijati ili deformirati, probijati ili rezati bateriju. U suprotnom može doći do curenja elektrolita, pregrijavanja, požara ili eksplozije.
- Nemojte lemiti polove baterija ili je rastavljati jer može doći do curenja elektrolita, prekomjernog zagrijavanja, požara ili eksplozije.

9. ZAŠTITA OKOLIŠA

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima dizajna za zaštitu okoliša. Čuvajte ga, koristite i odložite u skladu s odgovarajućim lokalnim propisima.

10. WARRANTY NOTICE

Warranty claims are at no cost. We will either repair or replace the defective products at no cost for 1 year from the original date of acquisition. Proof is required when filling the claim. The service is subject to the following stipulations:

What is Covered:

- The Syai PDM itself, including the components inside and other accessories.

What is Not Covered:

- Damage caused by misuse, abuse, accident, neglect, unauthorized repair, or modifications.
- Damage caused by failure to follow the Instruction for Use's/in-app instructions.
- Normal wear and tear of parts and components, visual changes, wear parts, and consumables.
- Products obtained from unauthorized/unofficial channels.

Warranty Service:

This warranty is limited to the repair or replacement of defective products. It does not entitle you to additional claims against the manufacturer, such as for damages. It also does not affect your statutory and contractual rights against the dealer or retailer. To file a warranty claim, contact the local Syai support team to proceed with your claim procedure.

Disclaimer:

Syai Health Technology Pte., Ltd. reserves the right to modify or discontinue this warranty at any time without notice.

Kemijske tvari

PDM sadrži sljedeće kemijske tvari:

Naziv kemijske tvari	CAS broj
LiCoO ₂	12190-79-3
Poliviniliden fluorid	24937-79-9
Poliviniliden difluorid	7782-42-5
Grafitni prah	21324-40-3
Grafitni prah	9002-88-4
Elektrolit	7440-50-8
Polietilen	7440-02-0
Bakrena folija	7429-90-5
Nikal	12190-79-3
Aluminijska folija	24937-79-9

Nastojimo vam pružati najnovije informacije
kako biste dobili najviše od svojeg PDM
uređaja tvrtke Syai.

Ove su upute samo smjernice za upotrebu,
a sadržaj se može mijenjati uslijed
ažuriranja proizvoda ili drugih čimbenika.

Syai Health zadržava pravo na izmjene
ovog priručnika bez prethodne obavijesti.

Syai Health Technology Pte., Ltd.

112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON 112
SINGAPORE